



ESDENT

ESDENT Tomografia Stomatologiczno-Laryngologiczna bezpiecznatomografia.pl

Wrocław 733 933 212

- Wiktora Brossa 1D-1E
- Pomarańczowa 8

Poznań 577 488 788

- Grochowska 45A
- Rataje 166/lok. 13
- Obronicka 291

Lubin 733 933 212


- Jana Pawła II 88B/II

OnDemand 3D Communicator


Instalacja programu	str. 2-4
Otwieranie badań	str. 5-7
Aktualizacja bazy implantów	str. 8-13

- Instalacja programu (kroki 1-5)


1. Po otwarciu instalatora, kliknij „Next”.

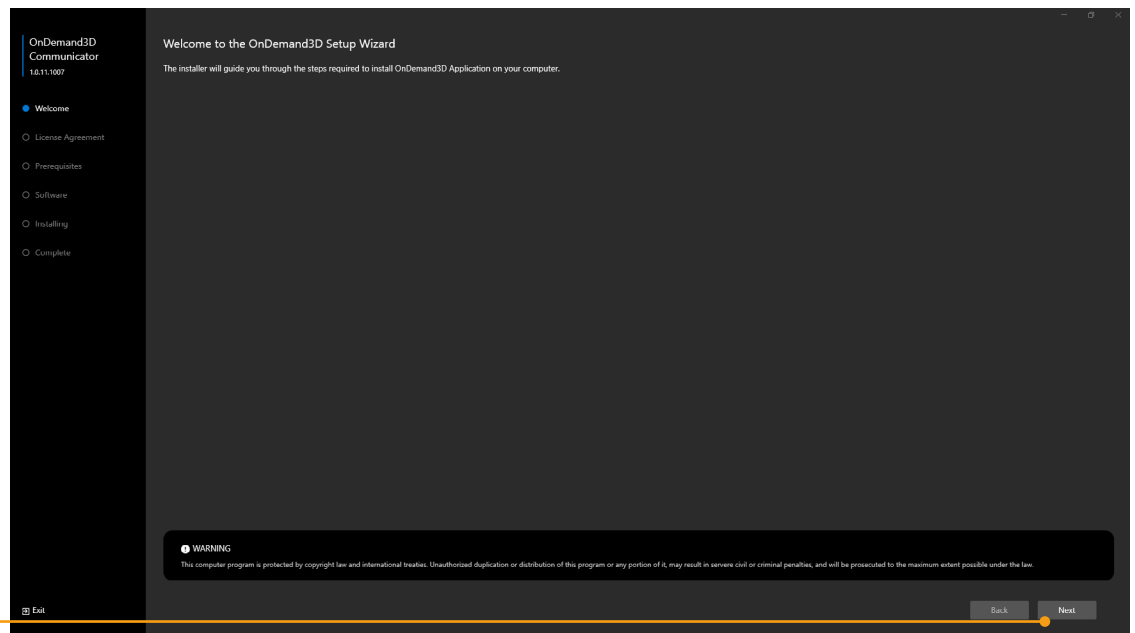


2. Zaakceptuj licencję, zaznaczając „I agree” i kliknij „Next”.

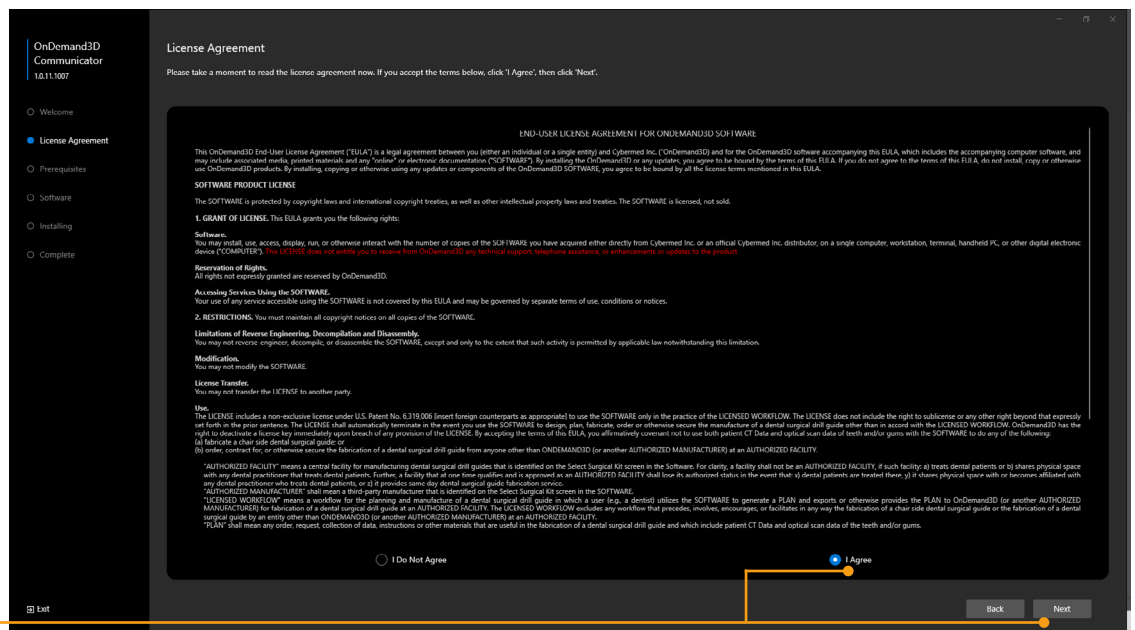


3. Kliknij „Next”.
Jeśli zamiast tego
pojawia się przycisk
„Download”, kliknij go,
a następnie kliknij
„Next”.

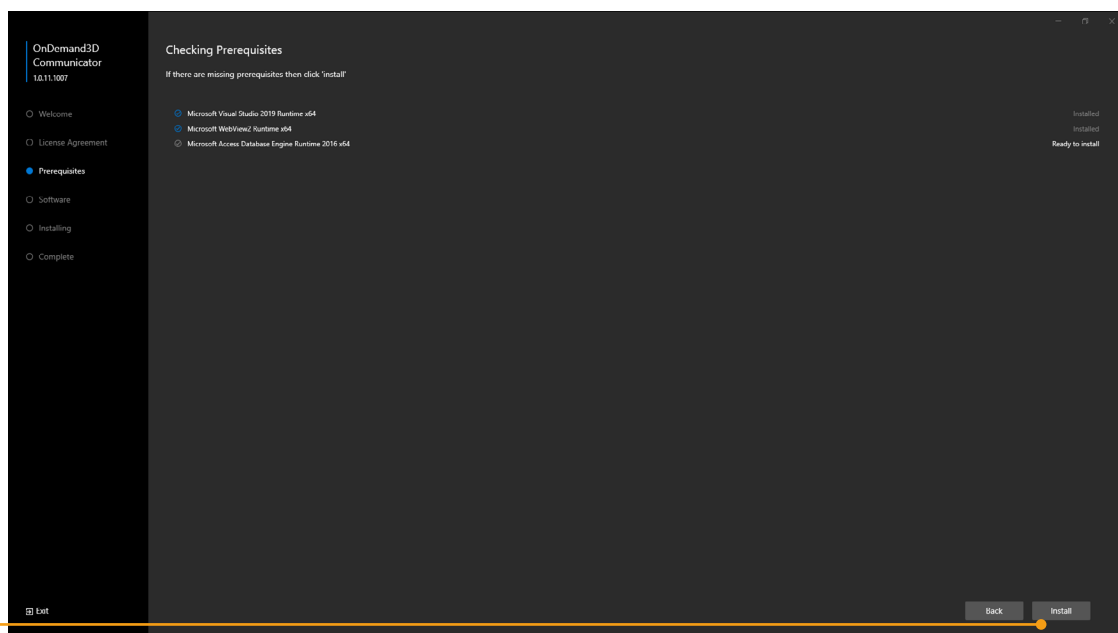

4. Z rozwijanego menu
wybierz polski (Polish),
a następnie kliknij
„Next”. W innym
przypadku program
będzie w języku
angielskim - późniejsza
zmiana języka będzie
wymagała będzie
ponownej instalacji.

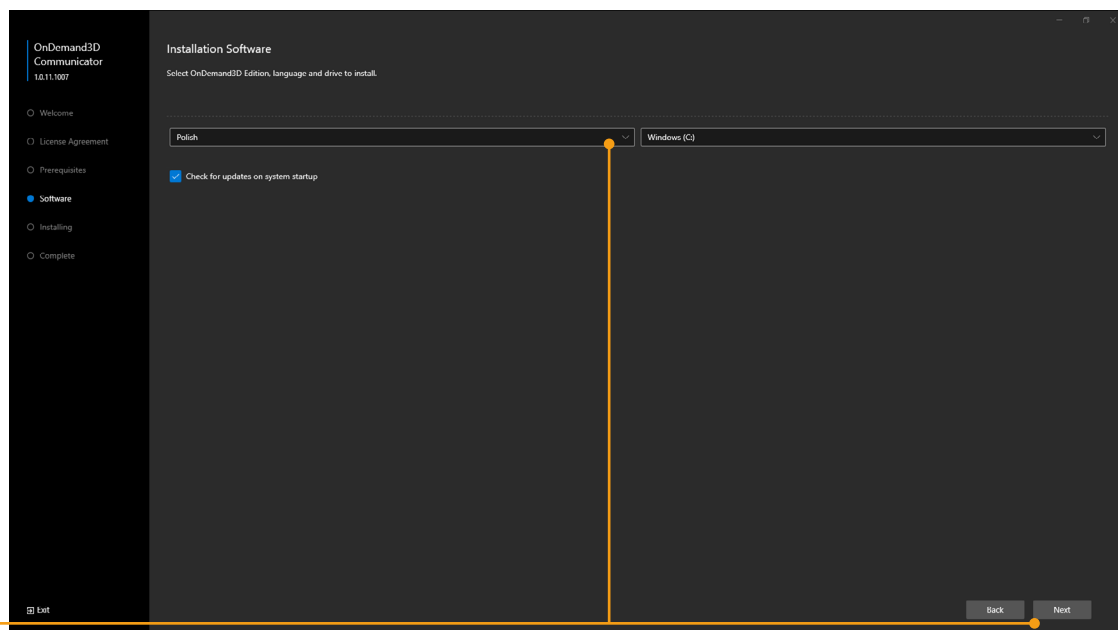


5. Instalacja zakończona, kliknij „Close”.

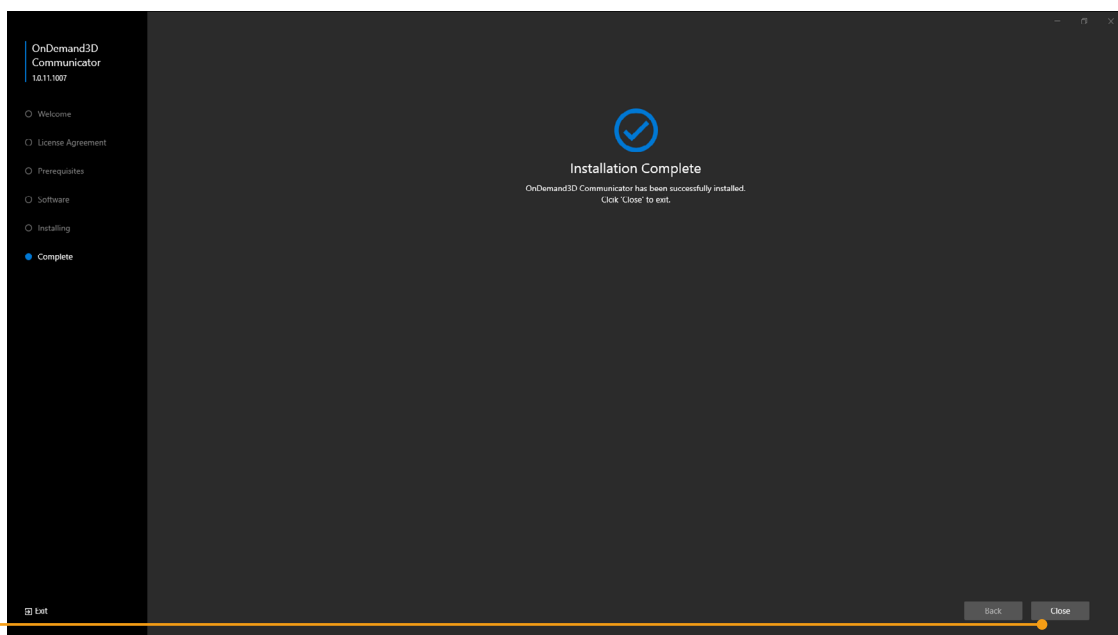

*Program OnDemand 3D Communicator nie jest kompatybilny z poprzednią wersją oprogramowania.

- Importowanie przesłanych badań do programu

W przesłanym badaniu znajdują się dwa elementy:
folder z badaniem i instalator OnDemand 3D Communicator.

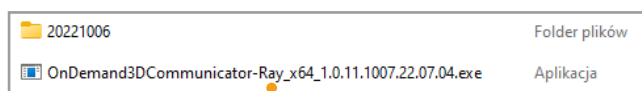


Aby otworzyć przesłane badanie:

1. Otwórz ponownie instalator OnDemand 3D Communicator klikając w niego dwa razy - mimo, że program jest już zainstalowany, to w taki sposób sam zaimportuje badania z folderu.
2. Zamknij instalator klikając „Close”, na Pulpicie zostanie utworzona baza pacjentów.
3. Otwórz program OnDemand 3D Communicator na Pulpicie klikając w niego dwa razy.


Istotna informacja: W trakcie importowania plików DICOM do programu CAD, należy pominąć pierwszy plik DICOM (projekt).

- Otwieranie badania (kroki 1-4)


1. Kliknij „Główna DB” jeśli badanie zostało zaimportowane w poprzednim kroku.

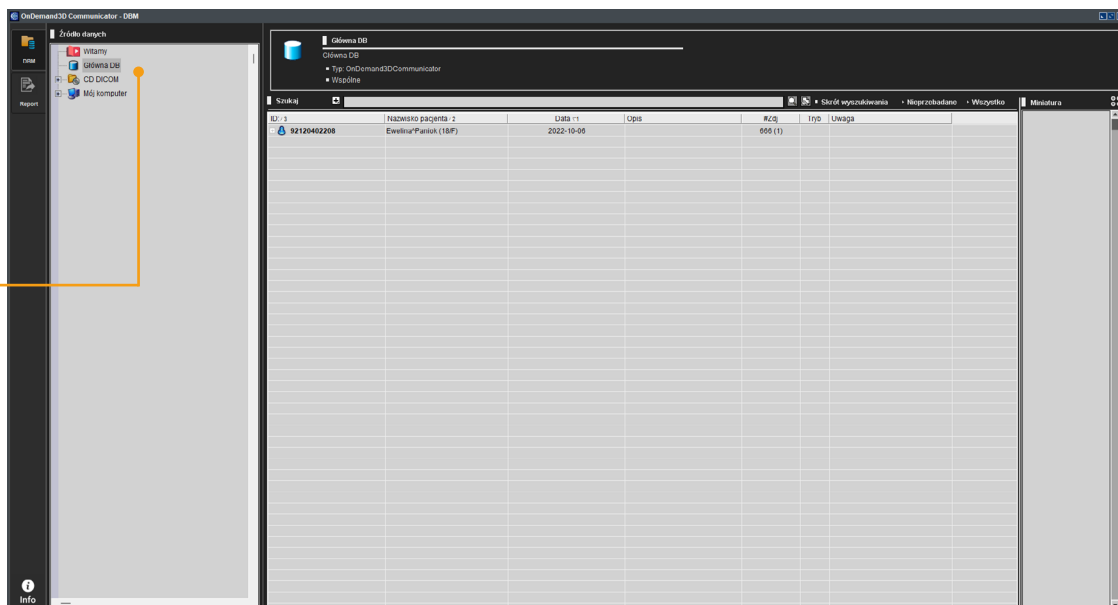

2. Kliknij ikonę plusa, a następnie kliknij dwukrotnie w „PRJ”.

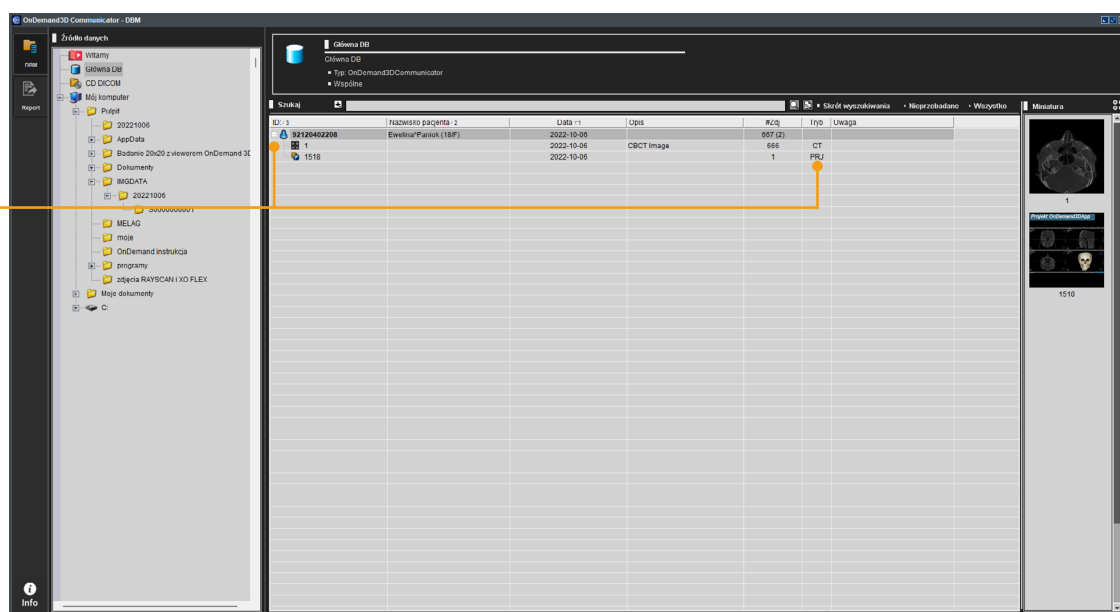

3. Kliknij „Otwórz”, lub wciśnij Enter.

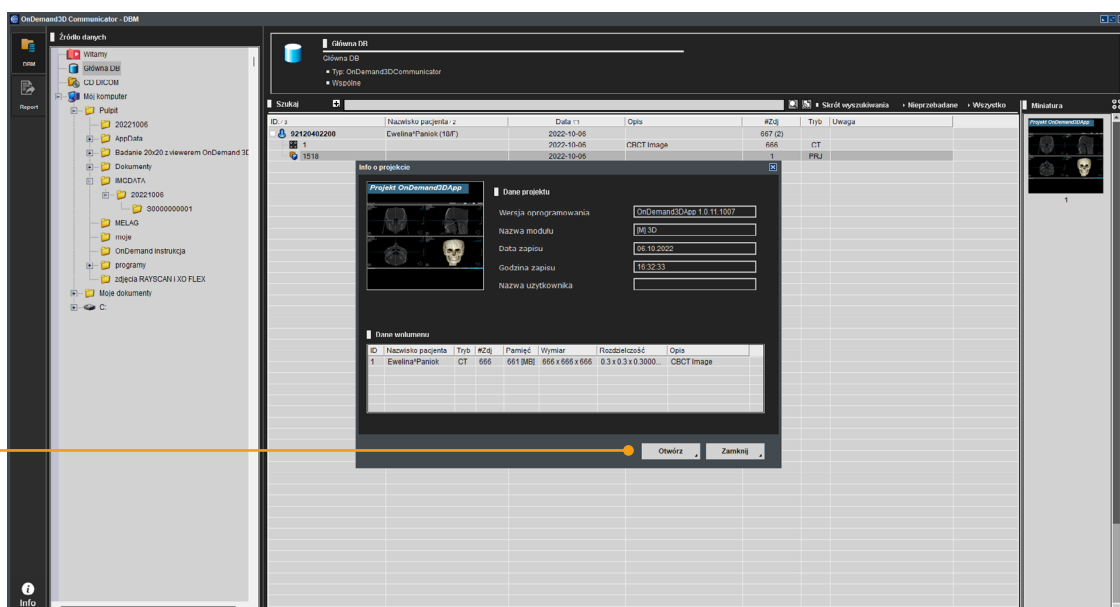


4. Program jest
gotowy do analizy.




- Aktualizacja bazy implantów (kroki 1-8)


1. Kliknij w ikonę Eksploratora plików w dolnym pasku ekranu:

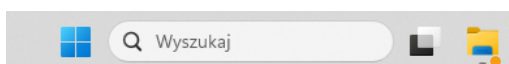


2. Kliknij w „Ten komputer” a następnie kliknij dwa razy w „Windows (C:)”.

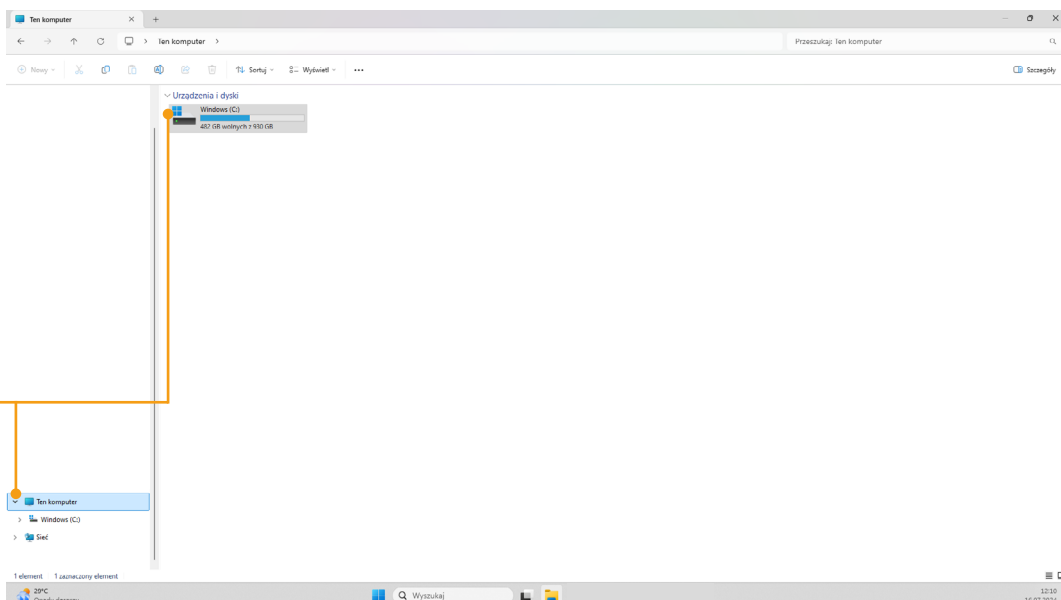


3. Kliknij dwa razy w „LeafImplant”.

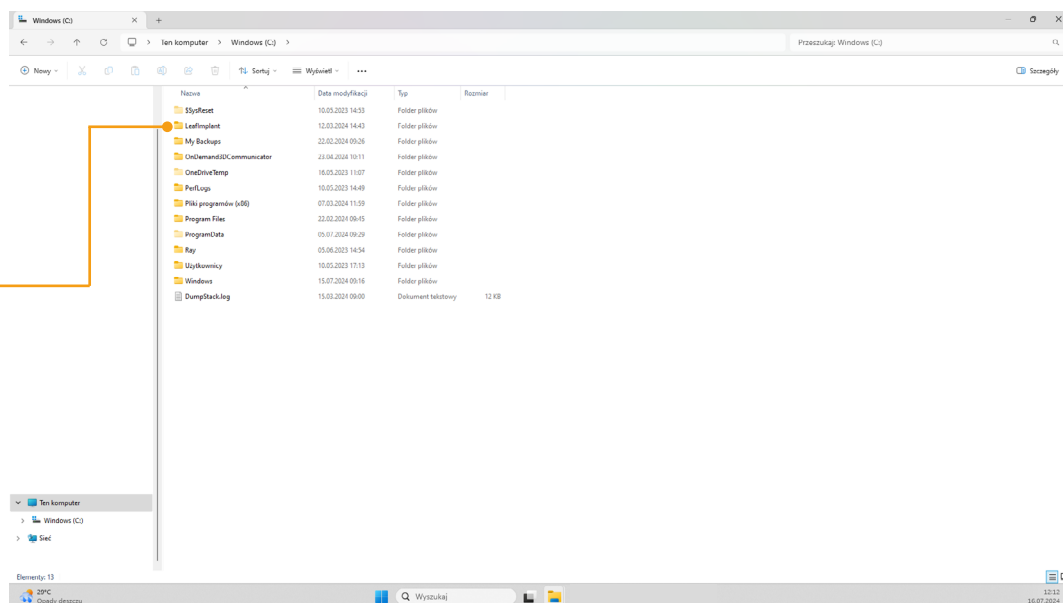

4. Kliknij dwa razy w „Bin”.

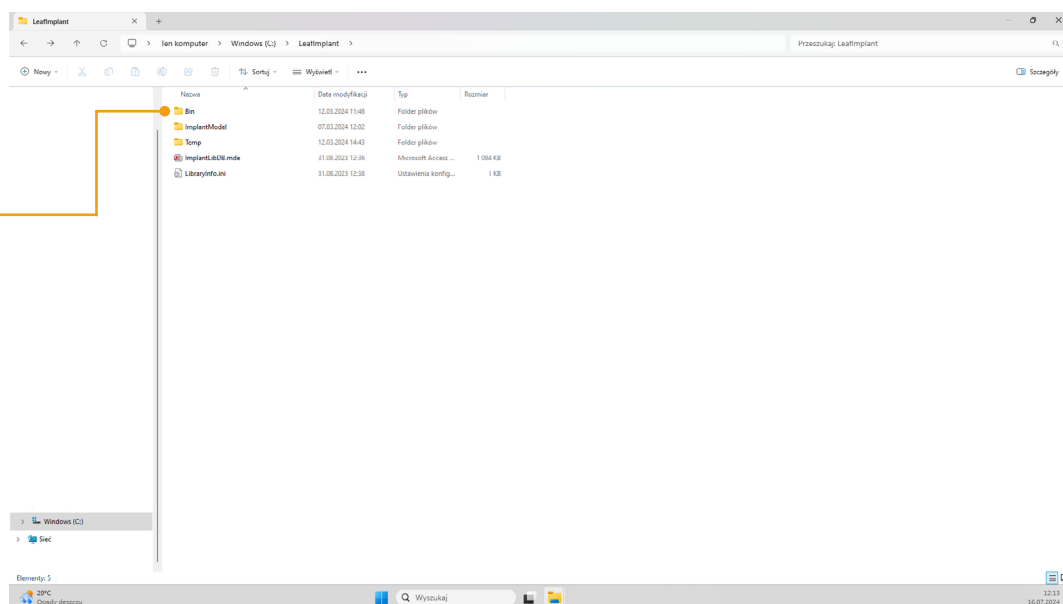


5. Uruchom „LeafImplant.exe.” klikając w niego dwa razy.


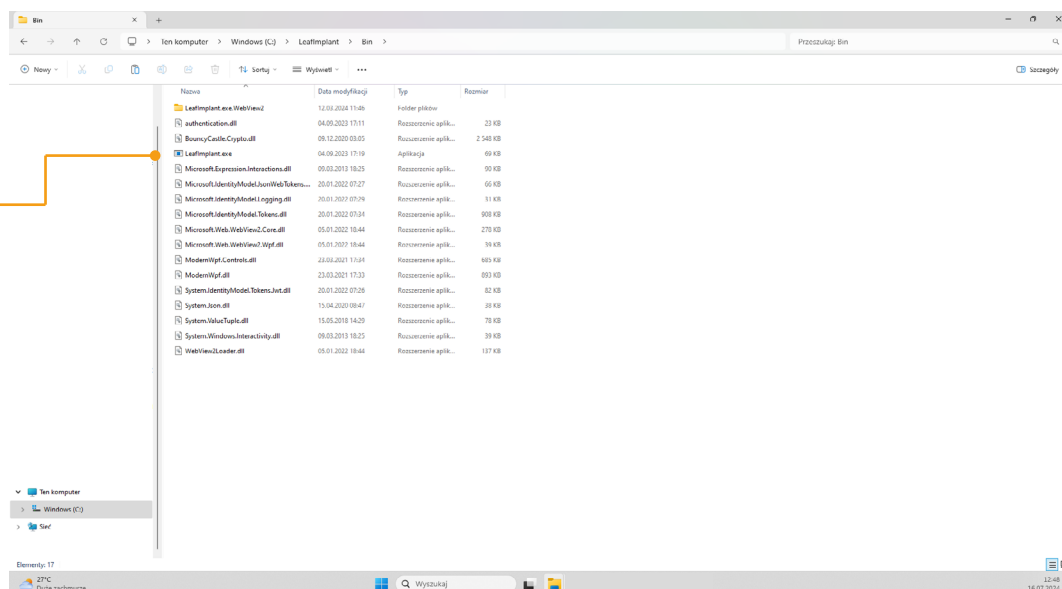


WAŻNE - jeśli masz już utworzone konto Leaf Implant - przejdź do punktu 7. Jeśli nie, w kolejnych krokach znajdziesz instrukcję zakładania konta.

6.1. W wyświetlonym oknie kliknij „Login”.

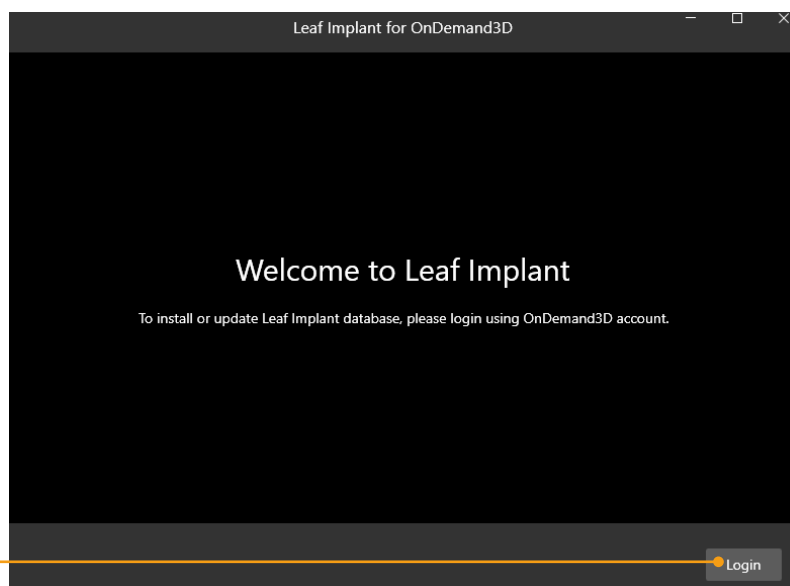

6.2. Kliknij „Register”,
a następnie wypełnij
podane pola i kliknij
„Register”,

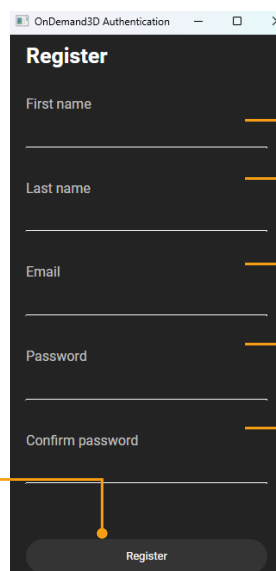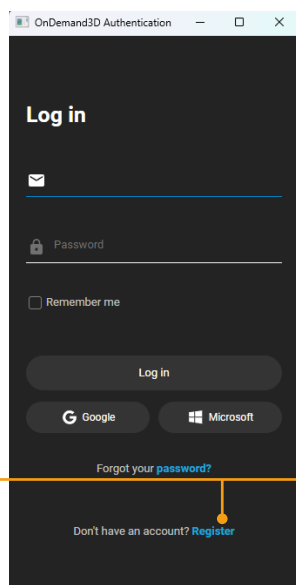

imię



nazwisko

adres mailowy


utwórz hasło

powtórz hasło


6.3. Na podany w
poprzednim kroku
adres mailowy, zostanie
wysłany mail z prośbą
o weryfikację konta.
Kliknij w znajdujący się
w nim link. Następnie
kliknij w „Click
here to proceed”.
W następnym
oknie zobaczysz
potwierdzenie
weryfikacji konta.

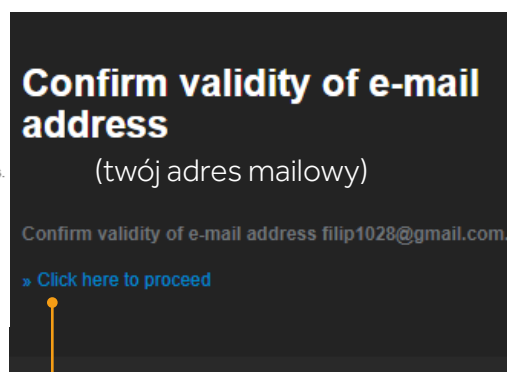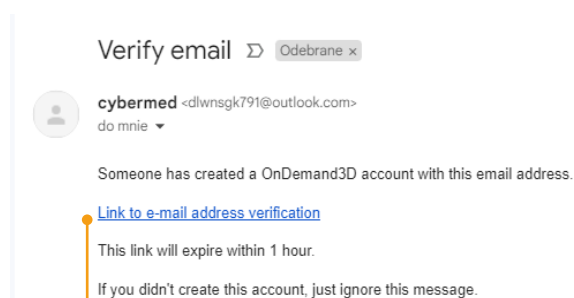


6.4. Wróć do programu i w wyświetlonym oknie kliknij „Click here”, a w następnym kroku kliknij „No”. Konto zostało utworzone, w następnym kroku możesz się zalogować.

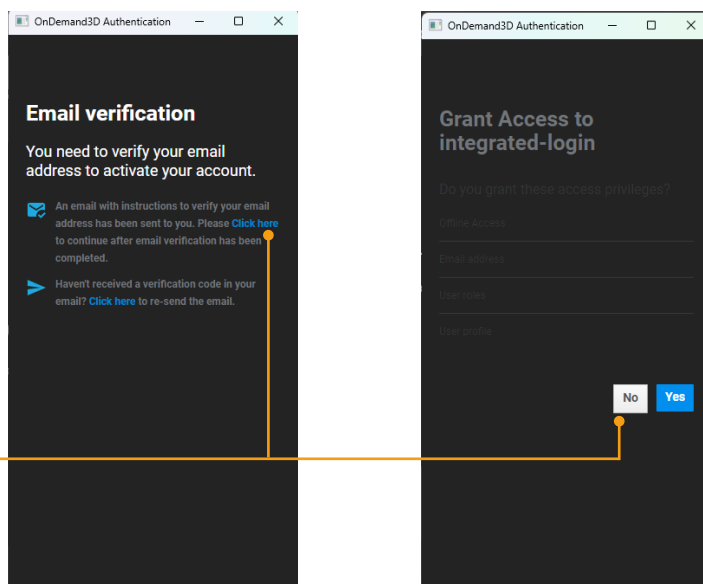

7. Kliknij „Login”.

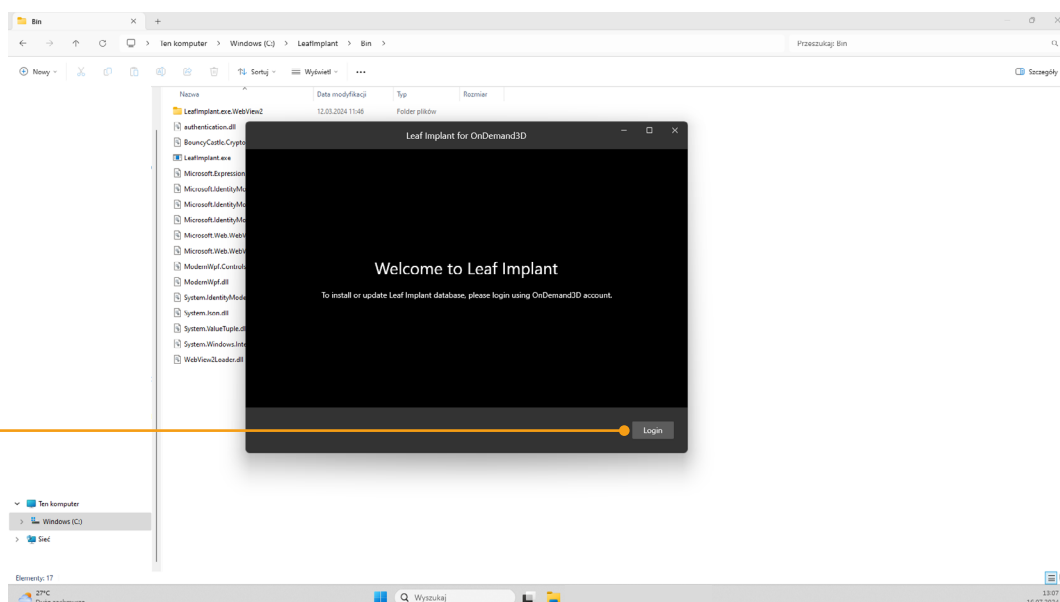

8. Zaloguj się danymi do konta Leaf Implant i kliknij „Log in”, a w następnym oknie kliknij „I agree”.

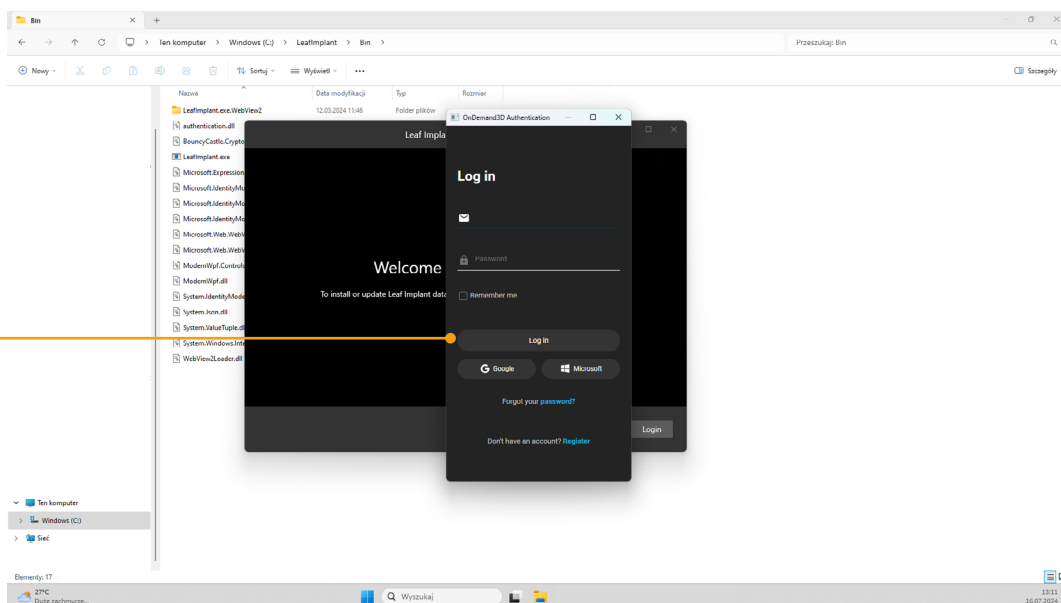

9. Wybierz interesującego Cię producenta (w lewej kolumnie) i zaznacz kwadraty przy implantach, które chcesz pobrać i kliknij „Update”.

